

**Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения для потребителя**

Название изделия медицинского назначения

Аллергиз[®], натуральный назальный порошковый спрей с мятой, 500 мг

Состав и описание изделия

Состав: Порошок целлюлозы 492,50 мг, порошок мяты 7,5 мг.

Аллергиз[®] состоит исключительно из натуральных компонентов. Назальный мелкодисперсный белый порошок растительной целлюлозы с легким запахом мяты во флаконе. Не содержит лекарств, консервантов, а также системно и местно действующих веществ, с клинически доказанной эффективностью. Не вызывает привыкания. Назальный спрей улучшает качество вдыхаемого воздуха за счет фильтрации аллергенов, поэтому только очищенный воздух поступает в легкие. Аллергиз[®] попадая на слизистую носа, образует тонкую прозрачную гелеобразную пленочку, которая выстилает носовую полость и выступает в качестве естественного барьера от пыли и микробов и других аэроаллергенов. Аллергиз[®] помогает выработать организму механизм защиты, благодаря которому блокируются присутствующие в воздухе аллергены, тем самым воздействует на причины аллергии и предотвращает развитие аллергических реакций.

Один флакон содержит 200 доз и рассчитан на 30 дней применения.

Наименование и (или) товарный знак организации-производителя

«Nasaleze Ltd».

Область применения

Аллергиз[®] применяется для лечения и профилактики сезонного и круглогодичного ринита и служит естественным барьером от аэроаллергенов:

- пыльцы растений
- бытовых аллергенов (клещи домашней пыли, бытовая пыль)
- грибковых аллергенов
- эпидермальных аллергенов животных и птиц
- аллергенов тараканов и других насекомых
- химических аллергенов и других микрочастиц, попадающих в носовую полость при дыхании.

Способ применения

Рекомендуется использовать Аллергиз[®] заранее, перед предполагаемым контактом с аллергенами, например, перед выходом на улицу в период цветения растений, посещением мест массового скопления людей, проведением домашней уборки, контакта с домашними животными.

Обычно для купирования симптомов аллергии достаточно по одному впрыску в каждую ноздрю 3 раза в день.

Действие наступает через 10-15 минут.

Перед каждым использованием Аллергиз[®] рекомендуется флакон встряхнуть.

Инструкция по применению

1. При первом использовании рекомендуется настроить дозирующее устройство на получение оптимальной дозы. Для этого необходимо расположить флакон-дозатор напротив себя и, слегка нажав на стенки флакона, сделать 2 пробных впрыска в воздух – вы увидите струйку белого порошка и ощутите легкий аромат мяты.
2. Аккуратно прочистите нос.
3. Сделайте выдох.
4. Зажмите пальцем одну ноздрю.
5. Поместите наконечник флакона в другую ноздрю.
6. Медленно, но крепко сожмите стенки флакона для выделения одной «струи» порошка, одновременно осторожно вдыхая его.
7. Задержите дыхание на две секунды и сделайте глубокий спокойный вдох, чтобы препарат проник в носовые ходы.
8. Повторите процедуру с другой ноздрей.
9. Используйте препарат по мере надобности. Для того, чтобы получить максимальный эффект при использовании Аллергиза[®], необходимо поддерживать наличие постоянного слоя порошка на внутренней поверхности носа. Это создает барьер между аллергеном и чувствительной мембраной слизистой носа - таким образом, естественная защитная система организма не выделяет гистамин, который вызывает появление симптомов аллергии.
10. Применяйте Аллергиз[®] до взаимодействия со средой, содержащей ингаляционные аллергены.

ВНИМАНИЕ

При соприкосновении наконечника флакона с влажной слизистой носовой полости возможно образование гелевой пробочки в дозаторе. В этом случае следует прочистить концевое отверстие дозатора –спрея.

Комплектность

По 500 мг натурального порошка во флаконе из полиэтилена с патентованным дозатором-спреем и навинчивающимся колпачком.

1 флакон вместе с инструкцией помещен в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить флакон закрытым, с плотно завинченной крышкой в сухом месте при комнатной температуре. Не замораживать.

Флакон рекомендуется использовать в течение 6 месяцев после вскрытия. Не использовать при повреждении флакона.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

5 лет.

Не использовать по истечении срока годности.

Побочные действия

Не вызывает побочных эффектов.

Меры предосторожности

Только для интраназального применения. Не использовать при повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Не использовать одновременно с другими назальными спреями, т.к. это может снизить эффективность Аллергиз[®]. При попадании порошка в глаза рекомендуется промыть их водой. Применяется у детей под наблюдением взрослых.

Беременность и период лактации

Разрешено применение во время беременности и грудного вскармливания.

Организация-производитель

«Назалит Лтд», Великобритания.

Остров Мэн, IM8 3DT

Владелец регистрационного удостоверения

«Сэлтфар СА», Швейцария

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии (предложения) по изделиям медицинского назначения от потребителей: Представительство «Сэлтфар СА». г. Алматы, пр. Аль-Фараби 5, Нурлы Тау 1А, офис 301. Тел/факс +7 (727) 311 16 28

Медициналық мақсаттағы бұйымдарды қолдану жөнінде тұтынушыларға арналған нұсқаулық

Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы

Аллергиз[®], мұрынға арналған табиғи ұнтақты спрей жалбызбен, 500 мг

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы

Құрамы: 492.50 мг целлюлоза ұнтағы, 7.5 мг жалбыз ұнтағы.

Аллергиз[®] тек табиғи компоненттерден тұрады. Жалбыздың аздаған иісі бар өсімдік текті целлюлозаның мұрынға арналған ұсақ дисперсиялы ақ ұнтағы құтыда. Құрамында дәрі, консерванттар, сондай-ақ жүйелі және жергілікті әсер ететін заттар жоқ, тиімділігі клиникалық тұрғыдан дәлелденген. Дағдылану туғызбайды. Мұрынға арналған спрей аллергияларды сүзудің арқасында ішке жұтылатын ауаның сапасын жақсартады, сондықтан тек тазартылған ауа ғана өкпеге барады. Аллергиз[®] мұрын шырышына түсе отырып, мөлдір гель тәрізді жұқа үлбір түзеді, ол мұрын қуысына төселіп, шаңнан және микробтардан және басқа да аэроаллергендерден табиғи бөгет ретінде әсер етеді. Аллергиз[®] организмде қорғаныс механизмінің туындауына көмектеседі, соның арқасында ауадағы аллергиялар бөгеледі, сол арқылы аллергияның себептеріне ықпал етеді және аллергиялық реакциялар дамуының алдын алады.

Бір құтының ішінде 200 доза бар және ол 30 күн бойы қолдануға арналған.

Өндіруші ұйымның атауы және (немесе) тауарлық белгісі

«Nasaleze Ltd».

Қолдану саласы

Аллергиз[®] кезеңдік және жыл бойғы ринитті емдеу және оның алдын алу үшін қолданылады және ол аэроаллергендерден табиғи бөгет қызметін атқарады:

- өсімдік тозаңдары
- тұрмыстық аллергиялар (үй шаңы, кенелері, тұрмыстық шаң)
- зеңді аллергиялар
- жануарлар мен құстардың эпидермальді аллергиялары
- таракандар және басқа жәндіктердің аллергиялары
- химиялық аллергиялар және тыныс алу кезінде мұрын қуысына түсетін басқа да микробөліктер.

Қолдану тәсілі

Аллергизді[®] алдын-ала, аллергиялармен болуы мүмкін жанасудың алдында мысалы, өсімдіктердің гүлдену кезеңінде көшеге шығар алдында, адамдар көптеп жиналатын орындарға барарда, үйді жинау, үй жануарларымен қарым-қатынас алдында пайдалану ұсынылады.

Әдетте аллергия симптомдарын басу үшін мұрынның әр қуысына бір бүркуден күніне 3 рет.

Әсері 10-15 минуттан кейін басталады.

Аллергизді[®] әрбір пайдалану алдында құтыны сілку ұсынылады.

Қолдану жөніндегі нұсқаулық

1. Алғаш пайдаланғанда оңтайлы дозаны алатындай етіп дозалау құрылғысын реттеу керек. Ол үшін дозатор-құтыны өзіңе қарсы ұстап, құтының қабырғаларын аздап баса отырып, ауаға 2 сынамалы бүрку жасау керек – сіз ақ ұнтақтың ағынын көресіз және жалбыздың жеңіл хош иісін сезесіз.
2. Мұрынды мұқият тазалаңыз.
3. Дем шығарыңыз.
4. Саусағыңызбен бір мұрын қуысыңызды қысыңыз.
5. Құтының ұшы екінің мұрын қуысына орналастырыңыз.
6. Ұнтақтың бір «ағынын» шығару үшін құты қабырғаларын баяу, бірақ бекем қысыңыз, бір мезгілде оны ақырын жұтыңыз.
7. Екі секунд тынысты тоқтата тұрыңыз да, препарат мұрын жолдарына өтуі үшін терең тыныс алыңыз.
8. Екінің мұрын қуысына да осы шараны қайталаңыз.
9. Препаратты қажетіне қарай пайдаланыңыз. Аллергизді[®] пайдалану кезінде ең жоғары әсер алу үшін мұрынның ішкі бетінде ұнтақтың тұрақты қабатының болуын қадағалау керек. Бұл аллергия мен мұрын шырышының сезімтал жарғақшасының арасында бөгет жасайды - осылайша, организмнің табиғи қорғаныс жүйесі аллергия симптомдары пайда болуын туындататын гистаминді бөлмейді.
10. Аллергизді[®] құрамында ингаляциялық аллергиялар бар ортамен өзара әрекеттескенге дейін қолданыңыз.
11. Мұрынды әрбір тазалаған сайын затты қайта қолдануды ұмытпаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құтының ұшы мұрын қуысының ылғалды шырышымен жанасқанда дозалағышта гельді тығын түзілуі мүмкін. Бұл жағдайда дозалағыш спрейдің ұшындағы саңылауды тазалап отыруы қажет.

Жиынтықталымы

Патенттелген дозалағыш-спрей және бұралып жабылатын қалпақшасы бар полиэтиленнен жасалған құтыда 500 мг табиғи ұнтақтан.

1 құты нұсқаулықпен бірге картон пәшкеге салынған.

Сақтау шарттары

Құтыны қақпағы тығыз бұралып жабылған түрде құрғақ жерде, бөлме температурасында сақтау керек. Мұздатып қатыруға болмайды.

Құтыны ашқаннан кейін 6 ай ішінде пайдалану ұсынылады. Құты зақымданғанда пайдаланбау керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау шарттары

5 жыл.

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.

Жағымсыз әсерлері

Жағымсыз әсерлер туындатпайды.

Сақтық шаралары

Тек интраназальді қолдануға арналған. Препарат компоненттеріне жоғары сезімталдық кезінде пайдаланбау керек. Мұрынға арналған басқа спрейлермен бірге пайдаланбау керек, өйткені бұл Аллергиз[®] тиімділігін төмендетуі мүмкін. Ұнтақ көзге түскен жағдайда оны сумен жуып шаю керек. Балаларда ересектердің қадағалауымен қолданылады.

Жүктілік және лактация кезеңі

Жүктілік және бала емізу кезінде қолдануға рұқсат етілген.

Өндіруші ұйым

«Назализ Лтд», Ұлыбритания

Мэн аралы, IM8 3DT.

Тіркеу куәлігінің иесі

“Сэлтфар СА”, Швейцария

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық мақсаттағы бұйымдар бойынша

шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын ұйымның мекенжайы: «Сэлтфар СА» өкілдігі. Алматы қ., Әл-Фараби даң. 5, Нұрлы Тау 1А, 301 кеңсе. Тел/факс +7 (727) 311 16 28